

**AESKULISA<sup>®</sup>**  
THE DIAGNOSTIC TOOL THAT WORKS

# LIBRETTO DI ISTRUZIONI

**AESKULISA<sup>®</sup> Toxoplasma gondii IgG / IgM**  
**Ref 6012 / 6013**





Aggiornamenti	
Ultima versione	V.005 del 21/11/2024
Versione precedente	V.004 del 07/04/2021
Capitolo modificato	Indirizzo, Capitolo 13
Motivo delle modifiche	Implementazione UDI, aggiornamento dell'indirizzo, aggiunta del capitolo 13



Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG  
Mikroforum Ring 2  
55234 Wendelsheim  
Germany  
Phone: +49 6734 9622-0  
Fax: +49 6734 9622-2222  
Website: [www.aesku.com](http://www.aesku.com)  
Mail: [info@aesku.com](mailto:info@aesku.com)

## Indice dei contenuti

1	Destinazione d'uso .....	3
2	Significato diagnostico .....	3
3	Principio del test <i>AESKULISA</i> ® .....	4
4	Antigeni .....	4
5	Componenti del test <i>AESKULISA</i> ® .....	4
6	Materiale aggiuntivo richiesto .....	5
7	Immagazzinamento e durata di conservazione .....	5
8	Esecuzione del test <i>AESKULISA</i> ® .....	5
8.1	Avvertenze generali .....	5
8.2	Preparazione dei reagenti .....	6
8.2.1	Strisce da microtitolazione (pronte all'uso) .....	6
8.2.2	Calibratori (pronti all'uso).....	6
8.2.3	Controlli (pronti all'uso).....	6
8.2.4	Tampone di diluizione dei campioni (conc. 5x) .....	6
8.2.5	Tampone di lavaggio (conc. 50x) .....	7
8.2.6	Coniugato POD anti IgA, IgG o IgM umane (pronto all'uso).....	7
8.2.7	Tampone substrato (pronto all'uso) .....	7
8.2.8	Reagente bloccante (pronto all'uso) .....	7
8.3	Preparazione del campione.....	7
8.3.1	Materiale dei campioni .....	7
8.3.2	Diluente per campioni .....	7
8.3.3	Assorbimento del fattore reumatoide con <i>AESKULISA</i> ® IgM .....	7
8.3.4	Conservazione dei campioni .....	7
8.4	Esecuzione del test .....	8
8.4.1	Schema di pipettamento.....	8
8.4.2	Svolgimento del test.....	8
8.5	Esecuzione con applicazione automatica.....	10
9	Valutazione di <i>AESKULISA</i> ® .....	10
9.1	Standardizzazione .....	10
9.2	Valutazione quantitativa .....	10
9.3	Intervallo dei valori limite.....	10
9.4	Intervalli di misura .....	10
9.5	Valutazione qualitativa .....	11
9.6	Criteri di validità .....	11
9.7	Interpretazione dei risultati .....	11
10	Caratteristiche delle prestazioni di <i>AESKULISA</i> ® .....	12
10.1	Sensibilità e specificità analitiche .....	12
10.2	Sensibilità e specificità diagnostica .....	12
10.3	Valori attesi .....	13
10.4	Ripetibilità .....	13
11	Istruzioni di sicurezza .....	14
11.1	Avvertenze e precauzioni .....	14
11.2	Smaltimento.....	14
12	Bibliografia.....	15
13	Simboli normativi .....	17

## 1 Destinazione d'uso

---

I test AESKULISA® Toxoplasma gondii IgG e IgM sono immunodosaggi qualitativi e quantitativi per la determinazione di anticorpi IgG e IgM umani diretti contro il *Toxoplasma gondii* nel siero o nel plasma. Il test AESKULISA® Toxoplasma gondii IgM viene utilizzato come test iniziale per la determinazione delle infezioni acute. Il test AESKULISA® Toxoplasma gondii IgG permette la conferma di un contatto patogeno e supporta il rilevamento dello stato immunitario.

L'interpretazione dei risultati può avvenire solo in correlazione con il quadro clinico. Una diagnosi non dovrebbe basarsi esclusivamente sui risultati del test eseguito, ma deve essere formulata tenendo in considerazione tutti i riscontri clinici e di laboratorio. Sono inoltre consigliabili ulteriori indagini per conferma. Gli immunodosaggi AESKULISA® sono progettati esclusivamente per l'uso diagnostico *in vitro* da parte di personale qualificato, addestrato, specificamente consigliato e che abbia familiarità con i metodi di laboratorio.

## 2 Significato diagnostico

---

Il *Toxoplasma gondii*, un parassita intracellulare, diffuso in tutto il mondo, appartenente al gruppo dei protozoi (organismi unicellulari animali), è l'agente patogeno della toxoplasmosi. La zoonosi si manifesta principalmente nei gatti, ma può essere trasmessa all'uomo. Le principali fonti d'infezione per gli esseri umani sono carne di maiale, manzo, pecora, pollame o agnello contaminata e non sufficientemente cotta e il contatto con feci di gatto contenenti oocisti. In seguito all'assunzione orale, il parassita penetra nella parete intestinale e si diffonde attraverso il sangue in tutto l'organismo, formando infine nei muscoli o in altri organi cisti che possono durare tutta la vita.

Le infezioni sono solitamente asintomatiche in individui immunocompetenti. In rari casi, dopo un periodo d'incubazione da una a tre settimane, si manifestano sintomi simil influenzali con febbre, mal di testa, dolori articolari e muscolari e ingrossamento dei linfonodi che talvolta possono comparire in modo intermittente e durare per mesi. In rari casi, si verificano retinocoroidite o encefalite.

I pazienti con sistema immunitario indebolito possono sviluppare focolai infiammatori in tutti gli organi. Particolarmente grave è la toxoplasmosi cerebrale che si manifesta nel cervello sotto forma di grandi processi di occupazione dello spazio con corrispondenti deficit neurologici e può portare a paralisi e convulsioni.

Un'infezione primaria da *Toxoplasma gondii* durante la gravidanza risulta particolarmente rischiosa, infatti, in caso di trasmissione diaplacentare dell'agente patogeno, vi è il rischio di una toxoplasmosi connatale con danni fetali importanti. Le manifestazioni cliniche vanno dalla retinocoroidite, idrocefalo e calcificazioni intracraniche fino al rigetto con aborto.

Per la diagnosi di un'infezione da *Toxoplasma gondii* sono disponibili metodi di determinazione diretta e indiretta. Nella diagnostica di routine, la determinazione indiretta dell'infezione da *Toxoplasma gondii* e il rilevamento dello stato immunitario avvengono mediante la rilevazione sierologica degli anticorpi IgG e IgM, specifici del *Toxoplasma gondii*.

### 3 Principio del test **AESKULISA®**

**AESKULISA®** (*AESKU Enzyme Linked Immunosorbent Assay*) è una procedura immunologica che si è dimostrata particolarmente efficace per la rilevazione degli anticorpi. La reazione di determinazione si basa sull'interazione specifica di anticorpi e antigeni. A questo scopo, le strisce reattive delle piastre da microtitolazione del test **AESKULISA®** sono rivestite con antigeni specifici di agenti infettivi che legano gli anticorpi presenti nel campione del paziente. Ulteriori anticorpi secondari marcati con perossidasi rilevano gli immunocomplessi così formati. L'enzima catalizza una reazione durante la quale un tampone substrato incolore viene trasformato in un prodotto colorato. L'intensità del segnale del prodotto di reazione è proporzionale all'attività anticorpale nel campione e viene misurata con metodo fotometrico.

### 4 Antigeni

La determinazione degli anticorpi con test **AESKULISA®** Toxoplasma gondii IgG e IgM si basa sull'uso di materiale specifico della parete cellulare di *Toxoplasma gondii* (ceppo RH).

### 5 Componenti del test **AESKULISA®**

Componente del test	Colore della soluzione	Colore del coperchio	Quantità / Volume
<b>Strisce da microtitolazione separabili</b> <b>MP</b> ciascuna con otto pozzetti rivestiti (per un totale di 96), 1 vassoio. Il materiale di rivestimento specifico del test è inattivato.	-	-	12 unità
<b>Calibratori A - D</b> <b>CAL</b> (pronti all'uso) Siero umano o anticorpo chimerico in soluzione proteica (BSA); colorati; conservante ProClin. L'attività anticorpale dei calibratori è indicata sulle loro etichette e sul certificato di controllo qualità del test <b>AESKULISA®</b> .	giallo*	bianco	4 da 1,5 ml
<b>Controllo positivo</b> <b>CON +</b> (pronto all'uso) Siero umano o anticorpo chimerico in soluzione proteica (BSA); colorati; conservante ProClin.	giallo*	rosso	1 da 1,5 ml
<b>Controllo negativo</b> <b>CON -</b> (pronto all'uso) Siero umano o anticorpo chimerico in soluzione proteica (BSA); colorati; conservante ProClin.	giallo*	verde	1 da 1,5 ml
<b>Tampone di diluizione dei campioni</b> <b>SB 5x</b> <b>conc. 5x</b> Soluzione proteica (BSA); colorato; conservante sodio azide < 0,1%. Il tampone dei campioni per gli immunodosaggi <b>AESKULISA®</b> IgM contiene Rf-Absorbent.	IgG, IgA: giallo IgM: verde	bianco	1 da 20 ml
<b>Tampone di lavaggio</b> <b>WASHB 50x</b> <b>conc. 50x</b> Soluzione con Tween 20; colorato; conservante ProClin.	verde	bianco	1 da 20 ml
<b>Coniugato anti IgA, IgG o IgM umane</b> <b>CONJ</b> (pronto all'uso) Anticorpo policlonale diretto contro le IgA, IgG o IgM umane,	IgA: rosso IgG: blu IgM: verde	IgA: rosso IgG: blu IgM: verde	1 da 15 ml

coniugato con perossidasi di rafano, stabilizzato in soluzione proteica (BSA); colorato; conservante ProClin.			
<b>Tampone substrato</b> <b>SUB</b> (pronto all'uso) TMB/H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> stabilizzato.	incolore	nero	1 da 15 ml
<b>Reagente bloccante</b> <b>STOP</b> (pronto all'uso) 1 M di acido cloridrico (HCl).	incolore	bianco	1 da 15 ml
<b>Certificato di controllo qualità</b>	-	-	1 unità
<b>Istruzioni per l'uso</b>	-	-	1 unità

\*L'intensità del colore aumenta con l'attività degli anticorpi.

## 6 Materiale aggiuntivo richiesto

- Normale attrezzatura da laboratorio con vetreria (cilindri graduati da 100-1000 ml), tubi per diluizioni, agitatore Vortex, micropipette (10, 100, 200, 500, 1000 µl) o multipipetta regolabile (100-1000 µl).
- Spettrofotometro per piastre da microtitolazione con filtro, lunghezza d'onda 450 nm, lunghezza d'onda di riferimento raccomandata nell'intervallo 600-690 nm (es. 620 nm)
- Dispositivo di lavaggio per piastre da microtitolazione (multipipetta da 300 µl, pipetta multicanale o sistema di lavaggio automatico)
- Carta da filtro
- *Acqua dist.*  
 Gli immunodosaggi **AESKULISA®** sono stati sviluppati per utilizzo con acqua purificata (*purified water*) secondo la definizione della farmacopea U.S. (USP 26 - NF 21) ed europea (Eur. Ph. IV ed.).

## 7 Immagazzinamento e durata di conservazione

Le strisce da microtitolazione devono sempre essere conservate nella pellicola della confezione con una bustina di materiale igroscopico. Se conservati correttamente nella confezione originale e a 2-8 °C / 35,6-46,4 °F, i reagenti e la piastra da microtitolazione sono stabili dopo l'apertura fino alla data di scadenza indicata. Le soluzioni diluite sono stabili per quattro settimane a 2-8 °C / 35,6-46,4 °F.

## 8 Esecuzione del test **AESKULISA®**

### 8.1 Avvertenze generali

L'esatta osservanza delle istruzioni per l'uso garantisce risultati corretti. Per un corretto impiego degli immunodosaggi **AESKULISA®** utilizzare solo i reagenti **AESKULISA®**. Non sostituirli con reagenti di altri produttori.

Le piastre da microtitolazione, i calibratori, i controlli e i coniugati degli immunodosaggi **AESKULISA®** sono tarati per test e lotti specifici e non possono essere utilizzati con altri lotti. Le valutazioni dei calibratori e dei controlli sono indicate sul certificato di controllo qualità dell'immunodosaggio **AESKULISA®**. La soluzione di lavaggio, la soluzione del tampone substrato

e il reagente bloccante possono essere combinati con tutti i gli immunodosaggi *AESKULISA*® indipendentemente dal test e dal lotto.

Il diluente del campione degli immunodosaggi *AESKULISA*® IgA e IgG può essere utilizzato con tutti gli immunodosaggi *AESKULISA*® IgA e IgG (codice articolo 6xxx) indipendentemente dal test e dal lotto. Il tampone di diluizione del campione degli immunodosaggi *AESKULISA*® IgM contiene Rf-Absorbent e può essere utilizzato con tutti gli immunodosaggi *AESKULISA*® IgM per sierologia infettiva (codice articolo 6xxx) indipendentemente dal test e dal lotto.

Al fine di evitare contaminazioni, per il prelievo dei reagenti è opportuno utilizzare sempre tecniche asettiche. Il coniugato e la soluzione del tampone substrato non devono mai essere pipettati con puntali contaminati da altri reagenti. La riproducibilità dei risultati dipende, tra l'altro, dall'accurata omogeneizzazione dei reagenti. Per questo motivo, le diluizioni del reagente e del campione devono essere accuratamente miscelate prima dell'uso. Una diluizione inadeguata può causare un calo di sensibilità nel rilevamento.

Inoltre, occorre garantire un'accurata tecnologia di pipettaggio e il rispetto dei tempi e delle temperature di incubazione specificati. Un lavaggio corretto previene le imprecisioni dei test.

Durante la conservazione e l'incubazione proteggere i reagenti dalla luce intensa. Evitare sempre l'esposizione a temperature superiori a 37 °C / 98,6 °F. Dopo l'uso, i reagenti devono essere chiusi ermeticamente per evitare la disidratazione e la contaminazione. Evitare di scambiare i tappi durante la chiusura dei flaconi.

Gli immunodosaggi *AESKULISA*® possono essere valutati solo se i criteri di validità sono stati soddisfatti.

## 8.2 Preparazione dei reagenti

Tutti i componenti e la piastra da microtitolazione devono essere portati a temperatura ambiente (20-25 °C / 68-77 °F) prima della preparazione del test. I reagenti liquidi devono essere accuratamente miscelati. Per la diluizione dei concentrati tampone usare solo flaconi di vetro puliti.

### 8.2.1 Strisce da microtitolazione (pronte all'uso)

Le strisce da microtitolazione sono provviste di sigle che identificano l'antigene con cui sono rivestite.

### 8.2.2 Calibratori (pronti all'uso)

I calibratori CAL A - CAL D sono pronti all'uso e non devono essere diluiti. I calibratori devono essere eseguiti a ogni test, indipendentemente dal numero di strisce reattive utilizzate.

### 8.2.3 Controlli (pronti all'uso)

Il controllo positivo CON+ e il controllo negativo CON- sono pronti all'uso e non devono essere diluiti. I controlli devono essere eseguiti a ogni test, indipendentemente dal numero di strisce reattive utilizzate.

A seconda delle linee guida nazionali, i laboratori possono anche convalidare i propri controlli e utilizzarli in alternativa.

### 8.2.4 Tampone di diluizione dei campioni (conc. 5x)

Il tampone concentrato deve essere diluito 1:5 con acqua distillata (ad esempio 20 ml + 80 ml) prima dell'uso. Il tampone degli immunodosaggi *AESKULISA*® IgM contiene Rf-Absorbent.

### 8.2.5 Tampone di lavaggio (conc. 50x)

Il tampone di lavaggio concentrato deve essere diluito 1:50 con acqua distillata (ad esempio 20 ml + 980 ml) prima dell'uso.

### 8.2.6 Coniugato POD anti IgA, IgG o IgM umane (pronto all'uso)

Il coniugato è pronto all'uso.

### 8.2.7 Tampone substrato (pronto all'uso)

Il tampone substrato TMB deve essere sempre pipettato con puntali nuovi per evitare contaminazioni. Evitare di esporre la soluzione di tampone substrato alla luce intensa.

### 8.2.8 Reagente bloccante (pronto all'uso)

Il reagente bloccante è pronto all'uso.

## 8.3 Preparazione del campione

### 8.3.1 Materiale dei campioni

Si raccomanda l'uso di campioni freschi di siero o di plasma EDTA. Non usare campioni che presentino contaminazione itterica, lipemica, emolitica o batterica. I campioni contenenti particolato devono essere centrifugati (< 1000 x g) e il surnatante deve essere rimosso per un ulteriore utilizzo. I campioni non devono essere sottoposti a inattivazione termica.

### 8.3.2 Diluente per campioni

I campioni dei pazienti devono essere diluiti 1:101 (ad esempio 10 µl + 1000 µl) con tampone del campione 1x e miscelati accuratamente.

### 8.3.3 Assorbimento del fattore reumatoide con AESKULISA® IgM

I fattori reumatoidi (Rf) sono prevalentemente autoanticorpi della classe IgM, che si legano preferibilmente agli immunocomplessi IgG. La determinazione di anticorpi IgM specifici per gli agenti patogeni può portare a risultati falsi positivi dovuti a questi fattori reumatoidi. Inoltre, gli anticorpi IgM con un legame più debole e specifici per gli agenti patogeni potrebbero essere sostituiti da anticorpi IgG con un legame più forte. La determinazione delle IgM potrebbe quindi portare a un falso negativo. Per questo motivo, il tampone del campione degli immunodosaggi AESKULISA® IgM contiene uno speciale Rf-Absorbent. L'assorbimento dei fattori reumatoidi avviene diluendo il campione del paziente in tampone del campione 1x dell'immunodosaggio AESKULISA® IgM e incubando per **almeno 15 minuti a temperatura ambiente**.

### 8.3.4 Conservazione dei campioni

I campioni dei pazienti devono essere utilizzati entro 8 ore e non devono essere conservati per più di 48 ore a 2-8 °C / 35,6-46,4 °F. Per conservare i campioni più a lungo tenerli a ≤ -20 °C / -4 °F. Evitare il ripetuto scongelamento e congelamento.

## 8.4 Esecuzione del test

### 8.4.1 Schema di pipettamento



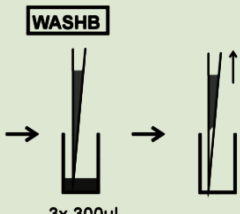
A seconda dell'impiego quantitativo o qualitativo previsto per l'immunodosaggio AESKULISA®, si raccomanda il seguente schema di pipettaggio:



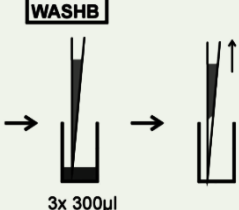


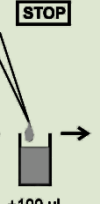

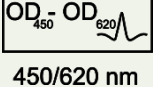
	Impiego quantitativo					Impiego qualitativo			
	1	2	3	4		1	2	3	4
A	CAL A	P3			A	CON-	P5		
B	CAL B	P4			B	CAL B	P6		
C	CAL C	P5			C	CAL B	...		
D	CAL D	P6			D	CON+			
E	CON-	...			E	P1			
F	CON+				F	P2			
G	P1				G	P3			
H	P2				H	P4			
	CAL A	Calibratore A				CON-	Controllo negativo		
	CAL B	Calibratore B				CAL B	Controllo <i>cut-off</i>		
	CAL C	Calibratore C				CON+	Controllo positivo		
	CAL D	Calibratore D							
	CON-	Controllo negativo							
	CON+	Controllo positivo							

### 8.4.2 Svolgimento del test

Inserire il numero di pozzetti richiesto nel vassoio e creare la scheda del protocollo.

Per la processazione manuale si consiglia di lavorare a temperatura ambiente.

Fase di lavoro	Simbolo	Descrizione
1. Aggiunta di calibratori, controlli e campioni diluiti		Aggiungere 100 µl di calibratori pronti all'uso, controlli e campioni diluiti a ogni pozzetto.
2. Incubazione del campione		Incubare per 30 +/- 3 minuti a 20-32 °C / 68-89,6 °F
3. Lavare 3 volte		Aspirare il liquido dai pozzetti; aggiungere 300 µl di soluzione di lavaggio 1x per pozzetto, aspirare la soluzione di lavaggio e ripetere la procedura altre due volte; battere la piastra.

<p>4. Aggiunta del coniugato</p>		<p>Aggiungere 100 µl di coniugato pronto all'uso per ogni pozzetto.</p>
<p>5. Incubazione del coniugato</p>		<p>Incubare per 30 +/- 3 minuti  a 20-32 °C / 68-89,6 °F</p>
<p>6. Lavare 3 volte</p>		<p>Aspirare il liquido dai pozzetti; aggiungere 300 µl di soluzione di lavaggio 1x per pozzetto, aspirare la soluzione di lavaggio e ripetere la procedura altre due volte; battere la piastra.</p>
<p>7. Aggiunta del tampone substrato</p>		<p>Aggiungere 100 µl di tampone substrato pronto all'uso per ogni pozzetto.</p>
<p>8. Incubazione del tampone substrato</p>		<p>Incubare per 30 +/- 3 minuti  a 20-32 °C / 68-89,6 °F,  proteggere dalla luce intensa.</p>
<p>9. Aggiunta del reagente bloccante</p>		<p>Aggiungere 100 µl di reagente bloccante pronto all'uso per ogni pozzetto nella sequenza di aggiunta del tampone substrato.</p>
<p>10. Incubazione</p>		<p>Opzionale: incubare 5 minuti.</p>
<p>11. Miscelazione</p>		<p>Scuotere la piastra con cautela per 5 secondi.</p>
<p>12. Analisi</p>		<p>Misurare la densità ottica entro 30 minuti a 450 nm rispetto alla lunghezza d'onda di riferimento raccomandata di 620 nm.</p>

## 8.5 Esecuzione con applicazione automatica

La processazione automatica degli immunodosaggi Aeskulisa® è analoga all'applicazione manuale. Seguire la procedura specificata. Gli immunodosaggi Aeskulisa® vengono valutati per l'uso con diversi strumenti; i relativi file sono disponibili su richiesta. Per la processazione automatica dei dosaggi immunoenzimatici Aeskulisa® su altre macchine, si raccomanda di sottoporre il file di test alla valutazione del fornitore del kit in collaborazione con il fornitore dello strumento. La corretta processazione automatica degli immunodosaggi Aeskulisa® deve essere convalidata dall'utente.

## 9 Valutazione di Aeskulisa®

---

### 9.1 Standardizzazione

Il test Aeskulisa® Toxoplasma gondii IgG è stato standardizzato secondo lo standard internazionale 13/132 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I risultati quantitativi sono indicati in IU/ml. La calibrazione del test Aeskulisa® Toxoplasma gondii IgM è stata eseguita su un siero di riferimento interno. I risultati quantitativi sono indicati in U/ml.

### 9.2 Valutazione quantitativa

In linea di principio, per gli immunodosaggi Aeskulisa® si raccomanda una valutazione quantitativa. Per generare la curva standard, i segnali di misura ottici (densità ottica, DO) dei calibratori sono valutati in funzione della loro attività anticorpale (in IU/ml o U/ml). Le attività anticorpali dei calibratori sono indicate sul certificato di controllo qualità specifico del lotto di test Aeskulisa®. Per la valutazione si consiglia il metodo log/lin e un curve fit con logistica a 4 parametri (4 PL). Sulla base della curva generata, l'attività anticorpale corrispondente è derivata dai segnali ottici di misura dei campioni.

### 9.3 Intervallo dei valori limite

L'intervallo dei valori limite del l'immunodosaggio Aeskulisa® è indicato sul certificato di controllo qualità e identifica gli intervalli dei risultati delle misurazioni borderline. Se la valutazione di un campione di un paziente si attesta al di sotto dell'intervallo dei valori limite il risultato del test è negativo; se la valutazione si attesta al di sopra dell'intervallo dei valori limite il risultato del test viene interpretato come positivo. A causa delle differenze nelle sieroprevalenze e nei programmi di vaccinazione dei singoli paesi, consigliamo di verificare l'intervallo dei valori limite con analisi condotte in proprio e, se necessario, di modificarlo.

### 9.4 Intervalli di misura

L'intervallo di misura dell'immunodosaggio Aeskulisa® è indicato sul certificato di controllo qualità. Lo studio di valutazione delle prestazioni ha dimostrato la linearità di diluizione dei campioni e l'alta precisione e riproducibilità dei risultati delle misurazioni in questo intervallo. I campioni che danno risultati superiori all'intervallo di misura devono essere classificati >max. I campioni che danno risultati al di sotto dell'intervallo di misura devono essere classificati <min. Se i campioni dei pazienti superano l'intervallo di misura, possono essere rianalizzati con una diluizione maggiore. Per la quantificazione, le attività anticorpali ottenute vengono poi moltiplicate per il fattore di diluizione aggiuntivo.

## 9.5 Valutazione qualitativa

La valutazione qualitativa con gli immunodosaggi AESKULISA® avviene confrontando la densità ottica (DO) del campione del paziente con la densità ottica media del calibratore B applicato due volte (calibratore di *cut off* CAL B). Se la densità ottica del campione del paziente rientra nell'intervallo +/- 20 % della densità ottica media del calibratore di *cut off* CAL B, deve essere valutata come borderline. Nel caso di una DO superiore, il campione del paziente deve essere ritenuto positivo, nel caso di una DO inferiore negativo.

## 9.6 Criteri di validità

Affinché il test sia ritenuto valido, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- DO CAL A < 0,3
- DO CAL A < DO CAL B < DO CAL C < DO CAL D < DO CAL E
- DO CAL E > 1,3
- Il controllo negativo deve risultare negativo.
- Il controllo positivo non deve risultare negativo.
- Per l'impiego quantitativo dell'immunodosaggio AESKULISA®, il controllo positivo deve rientrare nell'intervallo di validità indicato sul certificato di controllo qualità specifico del lotto di test AESKULISA®.
- Per l'impiego qualitativo dell'immunodosaggio AESKULISA®, i valori di DO del calibratore di *cut off* B (CAL B) eseguito due volte non devono differire di oltre il 20 %.

Se questi criteri non sono soddisfatti, il test non è valido e deve essere ripetuto.

Se il test risulta non valido, occorre controllare la data di scadenza dei reagenti (pronti all'uso), le condizioni di conservazione, i tempi e le temperature di incubazione, le pipette, il dispositivo di lavaggio, compresi i cicli di lavaggio, il fotometro e le altre apparecchiature utilizzate. Se nulla giustifica l'invalidità del test o si riscontrano altri risultati divergenti, contattare il fornitore o il fabbricante del kit.

## 9.7 Interpretazione dei risultati

Un immunodosaggio AESKULISA® positivo conferma la presenza di anticorpi specifici. Un risultato negativo mostra che nel campione del paziente non vi è alcuna attività anticorpale clinicamente rilevante contro l'agente patogeno, ma non esclude una nuova infezione. Nel caso di risultato borderline, non è possibile giungere a una valutazione certa del campione del paziente. In tal caso, il test deve essere ripetuto in parallelo con un nuovo campione di siero (coppia di sieri) prelevato a distanza di una o due settimane.

Un'infezione primaria è solitamente associata alla formazione di anticorpi IgM e IgG e sierconversione. Dopo un'infezione, l'attività degli anticorpi IgM di solito diminuisce di nuovo, tuttavia può persistere anche per diversi mesi fino a un anno. La determinazione sierologica di anticorpi IgM del *Toxoplasma gondii* da sola dunque non è indicativa di un'infezione acuta da *Toxoplasma gondii*. Una determinazione positiva di IgM deve quindi essere sempre accertata mediante ulteriori analisi. L'attività IgG responsabile della protezione immunitaria di solito persiste per tutta la vita.

## Schema di interpretazione di base dei risultati sierologici

Attività IgM	Attività IgG	Valutazione
negativo	negativo	Non sono rilevabili anticorpi specifici. Se vi sono motivi di sospetto, si raccomanda un nuovo test dopo una o due settimane.
positivo	negativo / positivo	Indicazione di infezione acuta. Si raccomandano ulteriori indagini per conferma.
negativo	positivo	Indicazione di infezione pregressa / latente.

L'interpretazione dei risultati può avvenire solo in correlazione con il quadro clinico. Una diagnosi non dovrebbe basarsi esclusivamente sui risultati del test eseguito, ma deve essere formulata tenendo in considerazione tutti i riscontri clinici e di laboratorio. Sono inoltre consigliabili ulteriori indagini per conferma.

## 10 Caratteristiche delle prestazioni di AESKULISA®

### 10.1 Sensibilità e specificità analitiche

Il limite di bianco (LoB) è stato valutato mediante analisi multiple di pozzetti contenenti solo il tampone del campione. Il limite di rivelabilità (LoD) è stato valutato mediante analisi multiple di campioni negativi.

	Limite di bianco (LoB)	Limite di rivelabilità (LoD)
AESKULISA® Toxoplasma gondii IgG	0,20 IU/ml	0,74 IU/ml
AESKULISA® Toxoplasma gondii IgM	0,44 U/ml	2,05 U/ml

La specificità analitica degli immunodosaggi AESKULISA® è stata studiata aggiungendo ai campioni sostanze potenzialmente interferenti e determinandone l'influenza sui risultati delle analisi. Non è stato possibile determinare un'influenza significativa di emoglobina (fino a 800 mg/dl), bilirubina (fino a 20 mg/dl), coniugato di bilirubina (fino a 20 mg/dl) e trigliceridi (fino a 3000 mg/dl) sui risultati delle analisi.

### 10.2 Sensibilità e specificità diagnostica

Per determinare la sensibilità e la specificità degli immunodosaggi AESKULISA® Toxoplasma gondii IgG e IgM, sono stati analizzati più 180 sieri di donatori di sangue e persone con sospetta infezione da *Toxoplasma gondii*; i risultati sono stati confrontati con quelli degli immunodosaggi IgG e IgM del Toxoplasma gondii di un importante competitor europeo.

	Sensibilità	Specificità
AESKULISA® Toxoplasma gondii IgG	> 99 %	> 99 %
AESKULISA® Toxoplasma gondii IgM	97,1 %	98,6 %

Per il calcolo della sensibilità e della specificità non sono stati presi in considerazione i risultati classificati come borderline.

### 10.3 Valori attesi

L'analisi dei sieri di donatori di sangue non selezionati con *AESKULISA*® Toxoplasma gondii IgG e IgM ha mostrato la seguente distribuzione:

<i>AESKULISA</i> ®	Numero di campioni	negativo	borderline	positivo
Toxoplasma gondii IgG	100	50 (50,0 %)	1 (1,0 %)	49 (49,0 %)
Toxoplasma gondii IgM	100	99 (99,0 %)	0 (0,0 %)	1 (1,0 %)

### 10.4 Ripetibilità

Per determinare la precisione e la riproducibilità dei risultati delle analisi con *AESKULISA*® Toxoplasma gondii IgG e IgM, sono state determinate la varianza intra e inter-dosaggio e la varianza da lotto a lotto con più campioni di attività anticorpale diversa.

#### *AESKULISA*® Toxoplasma gondii IgG

Campione	Estinzione (DO)	Attività IgG	Intra-test CV (IU/ml)	Inter-test CV (IU/ml)	CV (IU/ml) da lotto a lotto
Siero 1	0,311	8,8 IU/ml	4,9 %	5,0 %	5,3 %
Siero 2	0,493	10,1 IU/ml	6,2 %	7,2 %	5,5 %
Siero 3	1,051	27,5 IU/ml	6,3 %	7,0 %	8,0 %
Siero 4	1,259	36,4 IU/ml	4,8 %	5,3 %	5,9 %
Siero 5	1,753	71,8 IU/ml	7,6 %	12,1 %	9,8 %

#### *AESKULISA*® Toxoplasma gondii IgM

Campione	Estinzione (DO)	Attività IgM	Intra-test CV (U/ml)	Inter-test CV (U/ml)	CV (U/ml) da lotto a lotto
Siero 1	0,242	4,9 U/ml	5,4 %	9,1 %	6,5 %
Siero 2	0,385	8,1 U/ml	4,0 %	7,7 %	8,3 %
Siero 3	0,817	19,2 U/ml	6,2 %	8,2 %	10,0 %
Siero 4	1,287	35,7 U/ml	3,0 %	4,2 %	6,8 %
Siero 5	1,650	55,5 U/ml	5,6 %	10,5 %	9,8 %

Relazioni di studio più complete sulle caratteristiche prestazionali aggiuntive come la sensibilità analitica, la specificità analitica, l'esattezza, la precisione, l'accuratezza, il recupero, la linearità, i limiti di rivelabilità e l'intervallo di misurazione sono disponibili su richiesta.

## 11 Istruzioni di sicurezza

---

### 11.1 Avvertenze e precauzioni

Gli immunodosaggi AESKULISA® sono destinati esclusivamente alla diagnostica *in vitro* e solo a personale qualificato con una perfetta padronanza delle tecniche di lavoro. La manipolazione dei reagenti e dei campioni dei pazienti è disciplinata dalla buona pratica di laboratorio riconosciuta. Se il prodotto è danneggiato o se le informazioni sul prodotto, compresa l'etichettatura, sono errate, contattare il fabbricante o il fornitore del kit.

Non pipettare con la bocca. Nelle aree in cui vengono utilizzati i reagenti o i campioni dei pazienti evitare di mangiare, bere o fumare. Quando si maneggiano i reagenti e i campioni dei pazienti, evitare il contatto diretto indossando camici da laboratorio, guanti monouso e occhiali di sicurezza. In seguito lavarsi accuratamente le mani.

Il prodotto contiene diluizioni di sieri umani. Sebbene tutti i sieri utilizzati siano risultati negativi per gli anticorpi anti-HIV 1 e 2, per HBsAg (antigene di superficie del virus dell'epatite B) e per gli anticorpi anti-HCV, devono essere considerati potenzialmente infettivi. Il prodotto contiene anche componenti di origine animale. Nell'uso devono essere rispettate le direttive nazionali.

I singoli componenti del kit contengono reagenti potenzialmente pericolosi che possono causare irritazione agli occhi e alla pelle.

I singoli componenti contengono azoturo di sodio (NaN<sub>3</sub>) come conservante. L'azoturo di sodio può risultare tossico se ingerito o assorbito attraverso la pelle o gli occhi. Combinato con piombo o tubi di rame può formare azoturi metallici altamente esplosivi. Per evitare concentrazioni di azoturo, smaltire queste soluzioni insieme ad abbondante acqua.

I calibratori e i controlli nonché i campioni dei pazienti devono essere classificati come potenzialmente infettivi e trattati in conformità alle linee guida nazionali. I campioni dei pazienti e tutti i materiali potenzialmente infettivi devono essere decontaminati dopo l'esecuzione del test.

Tenere i reagenti fuori dalla portata dei bambini.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Un documento di sintesi sulla sicurezza e le prestazioni cliniche è disponibile tramite Eudamed e su richiesta.

### 11.2 Smaltimento

Per la decontaminazione e lo smaltimento, osservare le raccomandazioni del CDC e le disposizioni di legge locali e nazionali vigenti.

## 12 Bibliografia

---





















Enders, G. (2006) Labormedizinische Aspekte bei Cytomegalie und Toxoplasmose. Gynäkologie + Geburtshilfe 1, 24 – 8.

Ferguson, D. J. P. (2009) *Toxoplasma gondii*: 1908-2008, homage to Nicolle, Manceaux and Splendore. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 104, 133 – 48.

Sensini, A. (2006) Toxoplasma gondii infection in pregnancy: opportunities and pitfalls of serological diagnosis. Clin. Microbiol. Infect. 12, 504 – 12.



## 13 Simboli normativi

	- Diagnosi in vitro - Pour diagnostic in vitro - In Vitro Diagnostikum - Para uso Diagnóstico in vitro	- For in vitro diagnostic use - Para uso diagnóstico in vitro - In Vitro Διαγνωστικό μέσο
	- Numero d'ordine - Référence Catalogue - Bestellnummer - Número de catálogo	- Catalogue number - Numéro de catálogo - Αριθμός παραγγελίας
	- Descrizione lotto - Lot - Chargen Bezeichnung - Lote	- Lot - Lote - Χαρακτηρισμός παρτίδας
	- Identificatore univoco del dispositivo - Identifiant unique de l'appareil - eindeutige Produktidentifizierung - Identificador único do dispositivo	- Unique Device Identifier - Identificador único del dispositivo - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	- Conformità europea - Déclaration CE de Conformité - Europäische Konformität - Declaração CE de Conformidade	- EC Declaration of Conformity - Declaración CE de Conformidad - Ευρωπαϊκή συμφωνία
	- 96 determinazioni - 96 tests - 96 Bestimmungen - 96 Testes	- 96 tests - 96 pruebas - 96 προσδιορισμοί
	- Rispettare le istruzioni per l'uso - Voir les instructions d'utilisation - Gebrauchsanweisung beachten - Ver as instruções de uso	- See instructions for use - Ver las instrucciones de uso - Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης
	- Da utilizzarsi entro - Utilise avant le - Verwendbar bis - Utilizar antes de	- Use by - Utilizar antes de - Χρήση μέχρι
	- Conservare a 2-8°C (35.6-46.4°F) - Conserver à 2-8°C (35.6-46.4°F) - Lagerung bei 2-8°C (35.6-46.4°F) - Conservar entre 2-8°C (35.6-46.4°F)	- Store at 2-8°C (35.6-46.4°F) - Conserver a 2-8°C (35.6-46.4°F) - Φυλάσσεται στους 2-8°C (35.6-46.4°F)
	- Prodotto da - Fabriqué par - Hergestellt von - Fabricado por	- Manufactured by - Fabricado por - Κατασκευάζεται από
	- Calibratore cut-off - Etalon Seuil - Grenzwert Kalibrator - Calibrador de cut-off	- Cut off Calibrator - Calibrador de cut-off - Οριακός ορός Αντιδραστήριο βαθμονόμησης
	- Controllo positivo - Contrôle Positif - Positiv Kontrolle - Controllo positivo	- Positive Control - Control Positivo - Θετικός ορός ελέγχου
	- Controllo negativo - Contrôle Négatif - Negativ Kontrolle - Controllo negativo	- Negative Control - Control Negativo - Αρνητικός ορός ελέγχου
	- Calibratore - Etalon - Kalibrator - Calibrador	- Calibrator - Calibrador - Αντιδραστήριο βαθμονόμησης
	- Coniugato - Conjugé - Konjugat - Conjugado	- Conjugate - Conjugado - Σύζευγμα
	- Micropiastra rivestita - Microplaque sensibilisée - Beschichtete Mikrotiterplatte - Microplaca revestida	- Coated microtiter plate - Microplaca sensibilizada - Επικαλυμμένη μικροτράκα
	- Tampone di lavaggio - Tampon de Lavage - Waschpuffer - Solução de lavagem	- Wash buffer - Solución de lavado - Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης
	- Tampone substrato - Substrat - Substratpuffer - Substrato	- Substrate buffer - Tampón sustrato - Ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος
	- Reagente bloccante - Solution d'Arrêt - Stopreagenz - Solução de paragem	- Stop solution - Solución de parada - Αντιδραστήριο διακοπής αντίδρασης
	- Tampone campione - Tampon Echantillons - Probenpuffer - Diluente de amostra	- Sample buffer - Tampón Muestras - Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων